



Produktkatalog

SafeDon Hygiene System





SafeDon™ Hygiene System

- ✓ Vegghengt dispenser
- ✓ Forbedret hygiene
- ✓ Redusert hanskeforbruk



Et unikt dispenseringsystem for hansker

Påføring av hansker er en basal prosedyre, men det må gjøres riktig. SafeDon™ Hygiene System er et dispenseringsystem for hansker som alltid dispenserer én og én hanske med mansjetten først.

SafeDon™-boksen skal alltid stå i en vegghengt dispenser med åpningen ned. Når den første hansken dras ut, vil det alltid henge en ny mansjett klar til neste bruker. På denne måten unngår du berøring av området rundt boksen, hanskene i boksen, og boksen selv.

Egenskaper

- Dispenserer **én og én** hanske med **mansjetten først**
- Eliminerer **berøring rundt åpningen** og andre "ubrukte" hansker inne i boksen
- Forhindrer at hansker faller ut av boksen og dermed **reduserer forbruk**
- Eliminerer berøring på hanskens mest kritiske overflate: - **tommel, fingre og håndflate**

Korrekt påføring av hansker

Med SafeDon Hygiene System



01

Ta første hanske med
mansjetten først i din
dominante hånd



02

Ta på hansken med den andre
hånden, berør kun mansjetten



03

Ta den andre hansken med
den beskyttede hånden



04

Ta på hansken med den
andre hånden, berør
kun mansjetten



05

Hanskene er trygt tatt på
med minimal berøring av
hansker og eske.



Mikroorganismer på en tradisjonell hanskeboks

Bilder tatt fra en studie der
formålet var å illustrere **mikro-
organismer fra flere brukere**
på en tradisjonell hanskeboks.





Opp til 96% redusert smitte

SafeDon™ Hygiene System er blitt nøye testet, studert og sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser i blant annet Norge, Tyskland, England og andre Europeiske land. Studiene viser en samlet reduksjon på smittespredning via hansker og hanskeboks med opp til hele 96%.

Årsaken til dette er SafeDon systemets dispensering av hansker som begrenser kontaminering av hanskene i boksen, boksens åpning og boksen selv.

**Unngå berøring
av hanskens
kritiske
overflater**

**Unngå berøring
av boksen og
hanskene i
boksen**

**Reduser
smitte
med opp
til 96%**

Reference Studies: 01. Swan-Morton Study 2009: Six weeks trial with SafeDon / 02. Swan-Morton Study 2010: Six weeks trial with SafeDon / 03. Hughes KA, Cornwall J, Theis J-C, Brooks HJL., Bacterial Contamination of unused, disposable non-sterile gloves on a hospital orthopaedic ward. AMJ 2013, 6, 6, 331-338. / 04. Death and cost of HAIs in Scandinavia: www.ecdc.europa.eu/en / 05. Report 2014: Test of SafeDon Hygiene System at Ammerud and Vålerenga Nursing Home. / 06. Report 2015: Test of SafeDon Hygiene System at Tåsen Nursing Home. / 07. Report 2013: Test of SafeDon Hygiene Systems in Hospitals in Norway / 08. Report 2014: Contamination of glove boxes used in Nursing Homes: Comparing SafeDon Hygiene System with traditional glove boxes. Lab testing conducted by MatMikroLab, Division of Food Safety, NMBU Norwegian University of Life Sciences / 09. Report 2014: Contamination of glove boxes used in food production: Comparing SafeDon Hygiene System with traditional glove boxes. Lab testing conducted by MatMikroLab, Division of Food Safety, NMBU, Norwegian University of Life Sciences.





Opp til 30% redusert hanskeforbruk

SafeDon™ Hygiene System har blitt nøye testet, studert og sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser i blant annet Norge, Tyskland, England og andre Europeiske land. Studiene viser en samlet reduksjon på hanskeforbruk med opp til 30%

Årsaken til dette er dispenseringen, som gjør at færre hansker blir uheldig kontaminert og må kastes. Det gjør også at færre hansker faller på gulvet. I forsøkene ble opp til 99% av hanskene i SafeDon esken brukt.

Unngå at
hansker dras
ut og faller
på gulvet

Unngå uheldig
kontaminering
av ubrukte
hansker

Reduser
hanskeforbruk
med opp
til 30%

Reference Studies: 01. Swan-Morton Study 2009: Six weeks trial with SafeDon / 02. Swan-Morton Study 2010: Six weeks trial with SafeDon / 03. Hughes KA, Cornwall J, Theis J-C, Brooks HJL., Bacterial Contamination of unused, disposable non-sterile gloves on a hospital orthopaedic ward. AMJ 2013, 6, 6, 331-338. / 04. Death and cost of HAIs in Scandinavia: www.ecdc.europa.eu/en / 05. Report 2014: Test of SafeDon Hygiene System at Ammerud and Vålerenga Nursing Home. / 06. Report 2015: Test of SafeDon Hygiene System at Tåsen Nursing Home. / 07. Report 2013: Test of SafeDon Hygiene Systems in Hospitals in Norway / 08. Report 2014: Contamination of glove boxes used in Nursing Homes: Comparing SafeDon Hygiene System with traditional glove boxes. Lab testing conducted by MatMikroLab, Division of Food Safety, NMBU Norwegian University of Life Sciences / 09. Report 2014: Contamination of glove boxes used in food production: Comparing SafeDon Hygiene System with traditional glove boxes. Lab testing conducted by MatMikroLab, Division of Food Safety, NMBU, Norwegian University of Life Sciences.



SafeDon™ Hygiene System

- ✓ Unik dispensering
- ✓ 96 % redusert smitte
- ✓ 30 % redusert svinn
- ✓ 15 % redusert CO₂ avtrykk



Et revolusjonerende dispenseringsystem for engangshansker

Unngå berøring av hanskens mest kritiske overflater, boksen, og de andre hanskene i boksen ved å enkelt dispensere én og én hanske med **mansjetten først**. Denne unike metoden for dispensering av engangshansker har dokumentert redusert smittespredning på sykehus og sykehjem med opp til hele 96 %.

- Dispenserer **kun én og én** hanske med **mansjetten først**
- Eliminerer **berøring rundt åpningen** og andre "ubrukte" hansker inne i boksen
- Forhindrer at hansker faller ut av boksen og dermed **reduserer svinn**
- Eliminerer berøring på hanskens mest kritiske overflate: - **tommel, fingre og håndflate**

Reduser smittespredning med opp til 96 %

Ved å dispensere hansken med mansjetten først kan du alltid føle deg sikker på at hansken du tar på er trygg både for deg selv og andre. Studier viser at SafeDon Hygiene System reduserer smitte med opp til 96 %.

Se hvordan du korrekt påfører hansken med SafeDon Hygiene System her:



01

Ta første hanske med mansjetten først i din dominante hånd



02

Ta på hansken med den andre hånden, berør kun mansjetten



03

Ta den andre hansken med den beskyttede hånden



04

Ta på hansken med den andre hånden, berør kun mansjetten



05

Hanskene er trygt tatt på med minimal berøring av hansker og eske.



SafeDon Hygiene System

240 mm

SafeDon Hygiene System Nitrilhanske er en særdeles tynn hanske med svært god komfort som gir et godt grep og god fingerfølsomhet. Hansken er sterk og holdbar.

HYGIENE SYSTEM

Unik dispensering

Dette unike systemet dispenserer hansken med mansjetten først, hver gang. Dette eliminerer berøring av boks, holder, ubrukte hansker og hanskenes kritiske

Redusert svinn

Med dispensering av kun én og én hanske av gangen, kontamineres ingen av hanskene i boksen. På denne måten brukes hver hanske som hentes ut, og fører til mindre svinn.



- ✓ Unik dispensering
- ✓ Nitril
- ✓ Mikroteksturerte fingre
- ✓ Redusert svinn

250 stk per eske (XL 225 stk)
2 000 stk per kartong (XL 1 800 stk)

Strl.	Bredde	Art. Nr.
XS	≤ 80	SDN-200-01
S	80 ± 10	SDN-200-02
M	95 ± 10	SDN-200-03
L	110 ± 10	SDN-200-04
		SDN-200-05
XL	≥ 110	

Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)
 Håndflate (Midten av håndflate)
 Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

Enkel vegg (mm)

min. 0.05

Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001 ISO
 13485

ISO 14001 SA8000

EN 420:2003 EN 455 (1-4)

EN ISO 374-4, 5: 2013

Materiale

Nitril

Farge

Blå

SafeDon Hygiene System

270 mm

SafeDon Hygiene System Nitrilhanske er en særdeles tynn hanske med svært god komfort som gir et godt grep og god fingerfølsomhet. Hansken er sterk og holdbar. SafeDon Nitril 270 mm har lengre mansjett for bedre beskyttelse.

HYGIENE SYSTEM

Unik dispensering

Dette unike systemet dispenserer hansken med mansjetten først, hver gang. Dette eliminerer berøring av boks, holder, ubrukte hansker og hanskenes kritiske

Redusert svinn

Med dispensering av kun én og én hanske av gangen, kontamineres ingen av hanskene i boksen. På denne måten brukes hver hanske som hentes ut, og fører til mindre svinn.



- ✓ Lang mansjett
- ✓ Unik dispensering
- ✓ Nitril
- ✓ Mikroteksturerte fingre
- ✓ Redusert svinn

200 stk per eske (XL 180 stk)

1 600 stk per kartong (XL 1 440 stk)

Strl.	Bredde	Art. Nr.
XS	≤ 80	SDN-300-01
S	80 ± 10	SDN-300-02
M	95 ± 10	SDN-300-03
L	110 ± 10	SDN-300-04
XL	≥ 110	SDN-300-05

Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)
Håndflate (Midten av håndflate)
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

Enkel vegg (mm)

min. 0,11 ± 0,2
min. 0,08 ± 0,2
min. 0,07 ± 0,2

Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 900 ISO 13485
ISO 14001 SA8000
EN 420:2003 EN 455 (1-4)
EN ISO 374-4, 5: 2013

Materiale

Nitril

Farge

Blå



Montering og oppsett

HYGIENE SYSTEM

Holderne leveres med hver sine monteringsstrips. For at holderen skal henge sikkert på plass anbefaler vi å lime holderen til veggen med bruk av Tec7.

Plasser single / trippel holderen mot veggen og legg på press med begge hender i **5-10 sek.**

Vent **24 timer** før du setter i dispenserens og bruker SafeDon™ Hygiene System

Plasser SafeDon™ dispenserens i holderen **før** du åpner boksen

Vi leverer og monterer veggholdere
Gratis til alle nye kunder
Kontakt oss for mer informasjon.



Monteres
165 cm
fra gulv

Last ned vår monteringsveiledning på
www.dmedical.no/vare-produkter/safedon/



Veggholdere

Plast / Stål

HYGIENE SYSTEM

SafeDon holderne er designet med veggfeste for å holde boksen stabilt på plass med dispensering på bunn.

Holderne er tilgjengelige i singel og 3-pakk i materialene plast og stål.



Plast

Til SafeDon Hygiene System
200-250 pk

Størrelser:

139 mm x 130 mm x 93 mm

Farge:

Hvit ABS plast



Singel

Art.nr: GL9665B

20 stk per kartong

Trippel

Art.nr: GL9666B

6 stk per kartong

Stål

Til SafeDon Hygiene System
200-250 pk

Størrelser:

139 mm x 130 mm x 93 mm

Farge:

Stål



Singel

Art.nr: 883763

Trippel

Art.nr: 883764

SafeDon™ Dermagrip® Ultra LT

240 mm

100 % Nitrilhanske dispensert i SafeDon™ Hygiene System. Dispensersystemet bidrar til å redusere risikoen for krysskontaminering og er et alternativ til tradisjonelle dispenserbokser.



HYGIENE SYSTEM

SafeDon Hygiene System

Et unikt dispenseringssystem for økt smittevern. Ved å trekke hansken ut av boksen med mansjettens først, unngår man berøring av boks og ubrukte hansker.

Lateksfri

Denne undersøkelseshansken er 100 % lateksfri og eliminerer dermed allergiske reaksjoner forårsaket av naturgummilateks (type I allergier).



- ✓ SafeDon Hygiene System
- ✓ Lateksfri
- ✓ Pufferfri
- ✓ Rette fingre
- ✓ Strukturert overflate

50 stk per eske
400 stk per kartong

Strl.	Art. Nr.
XS	D1500-81
S	D1501-81
M	D1502-81
L	D1503-81
XL	D1504-81

Holder Liten Single
Antall: 100 stk

Strl:
46 mm x 122 mm
x 138 mm

Farge:
Klar Plexi

Tykkelsesmålinger av hanske
Fingre (15 mm fra tuppen)
Håndflate (Midten av håndflate)
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001 EN13485

EN ISO 374-1,4,5: 2016

Materiale

100% Nitril

Enkel vegg (mm)

min. 0,07

min. 0,06

min. 0,05

US FDA QSR

EN 16523-1: 2015

Farge

Blå

Kompakt, liten forpakning

med SafeDon™ Hygiene System

SafeDon™ Dermagrip® Ultra LT er svært godt egnet for montering i kjøretøy med begrenset plass. For eksempel i hjemmesykepleien, ambulanse, politibiler og lignende.



Liten og kompakt eske
som kan plasseres
med veggfeste

Smart dispensering
på forsiden av esken
med **mansjetten først**





Safedon's forpliktelse til bærekraft, etikk og arbeidsmiljø

Vi i SafeDon er stolte over å ha oppnådd sertifiseringene ISO14001 og SA8000.

Safedon's Produksjon har implementert flere miljøstyrings-praksiser for å oppnå ISO14001sertifiseringen. Produksjons-fasilitetene er tilrettelagt for å legge igjen et så lite miljøavtrykk som mulig. **SA8000** sertifiseringen understreker SafeDon produksjonens engasjement for å overholde internasjonale arbeidsstandarder. Dette innebærer rettferdige lønninger og arbeidstider, samt eliminering av barnearbeid og tvangsarbeid.

Vi streber kontinuerlig etter å opprettholde de høyeste standardene for miljøansvar og samfunnsansvar i alle aspekter av vår produksjon.

I SafeDon er vi forpliktet til å skape produkter som ikke bare er av eksepsjonell kvalitet, men også produsert med integritet, medfølelse og respekt for verden vi lever i.

- SafeDon

Hanskevettreglene

- 1 **Husk å ta av hanskene** etter bruk
- 2 **Ikke ta på omgivelser** med urene hansker
- 3 Unngå å ta på hansker med **fuktige hender**
- 4 **Ikke desinfiser hanskene** (*hanskenes beskyttelsesevne forringes ved kontakt med såpe/alkohol*)
- 5 Ikke bruk hansker som **erstatning for håndhygiene**

Korrekt påføring av hansker

1. Utfør **håndhygiene**
2. **Ta en hanske** ut av hanskeboksen.
Unngå å berøre de andre hanskene i boksen
3. **Hold hansken øverst i mansjetten.**
Berør minst mulig av hanskens utside
4. **Ta hansken på første hånd**
5. **Ta en ny hanske ut av esken.** *Unngå å berøre de andre hanskene i boksen og berør minst mulig av hanskens ytterside med bar hud*
6. **Ta på andre hanske.** *Unngå berøring av bar hud med den behanskede hånden*
7. Når hanskene er tatt på, **unngå unøwendig berøring** av gjenstander før oppgaven utføres

Hvordan ta av hansker etter bruk

1. **Grip utsiden av hanske mansjetten.**
Dra hansken av med rolig bevegelse slik at hansken vrenses
2. **Hold hansken i den hanskebekleddede hånden.** Plasser pekefinger på innsiden av hanskemansjetten.

Dra hansken rolig av slik at den **vrenses over hansken** som holdes i hånden.
3. **Kast hanskene**
4. Utfør **håndhygiene**



Kilde: Folkehelseinstituttet: Hvordan ta på og av rene engangshansker

Sertifiseringer og standarder

Produksjon og sosial-og-miljøansvar

Vi i DMedical legger stor vekt på at våre hansker skal være av beste kvalitet. Våre hansker er produsert i henhold til følgende standarder og sertifiseringer:

Disse står spesifisert på hver produktside.

ISO 374-1,2,4,5: 2016

Krav til beskyttelseshansker

Denne sertifiseringen spesifiserer kravene til beskyttelseshansker beregnet til å beskytte brukeren mot farlige kjemikalier og definerer begreper som skal brukes.

1. Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer
2. Bestemmelse av motstand mot penetrering
3. Bestemmelse av motstand mot nedbrytning av kjemikalier
4. Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer

ISO 13485: 2016

Kvalitetsstyringssystem

Denne sertifiseringen spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem der en organisasjon tilbyr medisinsk utstyr og lignende. Denne sertifiseringen er involvert i flere stadier av livssyklusen inkludert design, utvikling, produksjon, lagring og distribusjon, installasjon, service, levering, teknisk støtte etc.

ISO 9001: 2015

Kvalitetesledelse

Stiller krav til systemer for kvalitetsstyring i virksomheten. Dette er til for å gi et bedre overblikk, som igjen fører til økt kvalitet og effektivitet.

ISO 14001

Miljøansvar

Spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede miljøpåvirkninger.

SA 8000

Sosialt Ansvar (Ledelse)

Demonstrer at du har implementert internasjonale prosesser som sikrer menneskerettighetene for de ansatte.

EN 420: 2003

Vernehansker: Generelle krav og prøvingsmetoder

Denne standarden definerer de generelle kravene og relevante testprosedyrer for hanskedesign og konstruksjon, motstand av hanskematerialer mot vanninntrengning, uskadellighet, komfort og effektivitet, merking og informasjon gitt av produsenten som gjelder for alle vernehansker.

EN 455: 2015 (1-4)

Engangshansker til medisinsk bruk

Krav til prøving:

1. For fravær av hull
2. Av fysiske egenskaper
3. Av biokompatibilitet
4. For bestemmelse av holdbarhet



AQL (ISO 2859-1:1999)

Kvalitetssikring per enhet

AQL (Acceptable Quality Limit) er en "lot-by-lot" inspeksjon som identifiserer et maks antall av defekte enheter per boks. En AQL på f.eks. 1,5 betyr maks 1,5 % defekte enheter per boks.

ASTM D3577

Standardspesifikasjon for kirurgiske gummihandsker

Denne spesifikasjonen dekker visse krav for emballerte sterile gummikirurgiske hansker av naturgummilateks-typen (Type 1) og av syntetisk gummilateks-typen (Type 2). Testet iht. at hanskene skal være fri for talkum og med dimensjoner og fysiske egenskaper som skal være i samsvar med de spesifiserte kravene.

Tester for sterilitet, hullfrihet, fysiske dimensjoner, strekkstyrke, brudd-forlengelse, spenning ved forlengelse, pudderfri rest, pulvermengde, proteininnhold og antigen proteininnhold.

FNs Bærekraftsmål

Vi i DMedical er aktivt opptatt av å gjøre vår del for å redusere klimaendringene og følge FNs bærekraftsmål.

Vi har stor tro på at et godt samarbeid om alle delmålene er det som skal til for å nå målene, og har satt oss egne mål for hvordan vi kan bidra.



3. God helse og livskvalitet

Ved å fokusere på innovasjon og utvikling i våre produkter er vi aktive pådrivere av en bedre fremtid som påvirker måten vi jobber på i dag.



8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som medlemsbedrift av **Etisk Handel Norge** er vi nødt til å stille strenge krav til våre leverandører om å ivareta menneske- og arbeidstaker-rettigheter, samfunn og miljø.



12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi i DMedical stiller strenge krav internt til forbruk og produksjon gjennom avfallshåndtering og utsendelser. I tillegg stiller vi strenge miljøkrav til våre leverandører, dette går på produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse, og merking av avfall.



Omsorg - Helse - Miljø

Vi i DMedical jobber hver dag for å øke vår kunnskap innenfor våre fagområder. Vi bruker vår kompetanse og erfaring når vi utvikler nye løsninger for våre kunder. Vi er engasjerte ildsjeler som brenner for innovasjon og utvikling.

Vi skal tilby produkter som har positiv innvirkning på helsen til både helsearbeidere og pasienter. Det er i møte med mennesker vi kan gjøre hverdagen tryggere gjennom våre systemer og produkter.



DMedical AS

Om oss



Vi er en betydelig leverandør innenfor flere områder i helsemarkedet; blant annet hygiene, operasjon, avfallshåndtering og medisinsk behandling.

Som virksomhet stiller vi høye krav til både oss selv og våre leverandører i henhold til arbeids- og miljøforhold, samfunn og bærekraft.

Vi er stolte medlemmer av Etisk Handel Norge, Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge. Les mer om hvordan dette påvirker oss som virksomhet her:

Etisk Handel Norge

Som medlemsbedrift stilles strenge krav til oss om sikring av anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.

Dette gjør at vi aktivt jobber med å forbedre vår kunnskap, og kontinuerlig følger opp våre rutiner. Etisk Handel gir oss den kunnskapen vi trenger for å kunne jobbe målrettet for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, og samfunn- og miljøansvar i samarbeid med våre partnere.

Miljøfyrtårn

Vi i DMedical er stolte over å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. For oss betyr dette at vi skal være en virksomhet med et felles og sunt verdsett.

Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet.

Våre verdier gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi følger nøye kravene som stilles, og arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Grønt Punkt Norge

Som leverandør ønsker vi å være nøye i måten vi bruker materialer og ressurser, spesielt i forhold til utsendelser og transport. Vi er stolt medlemsbedrift





DMedical

Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Norway

post@dmedical.no
+47 45 39 33 87
www.dmedical.no



Denne brosjyren
kildesorteres som
papiravfall.



Denne trykksaken er trykket
på **Svanemerket** papir.

