

**KIILTO PRO 75+**



**Art. Nr:** 495-12

**Antall:** 12 x 1 000 ml

**EAN/ GTIN:** 7331964004951

**GTIN (krt):** 7331964904954



## KIILTO PRO 75+ Overflatedesinfeksjon

**Kiilto Pro Overflatedesinfeksjon 75+ er beregnet for desinfisering av glatte overflate overflater, f.eks. benker, bord og undersøkelsesbord.**

Den er effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som Koronavirus, HIV, Hepatitt B og C samt visse nakne virus som Adenovirus og Murine Norovirus. Produktet fungerer raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

Kiilto Pro Overflatedesinfeksjon 75+ inneholder overflate aktivt middel, som gjør at overflaten ikke trenger å rengjøres først. Men hvis overflaten er veldig skitten eller har mye tørket blod, anbefales det å rengjøre den med et vanlig vaskemiddel først.

### Bruksanvisning

Brukes på overflater som tåler alkohol.

- 1. Spray rikelig** på overflaten eller bløtlegg en tørkeklut med ufortynnet væske
- 2. Bearbeid overflaten** gjentatte ganger i minst 30 sekunder (Se over for kontakttider)
- 3. La overflaten lufttørke**

**Oppbevaring:** Oppbevares i romtemperatur, lukk lokket etter bruk. Holdbar 3 år fra produksjon.

### PRODUKTEGENSKAPER

- 75 vol. % alkoholstyrke, med etanol som hovedkomponent
- Virker raskt og effektivt uten å sette spor på den behandlede overflaten
- Inneholder overflateaktivt middel som gjør at overflater ikke trenger å forbehandles
- Har dokumentert effekt på bakterier, sopp og flere ulike virus som f.eks. Corona, HIV, Murine Norovirus og Adenovirus

#### Innhold:

Ingrediens	Effekt
Etanol 75%	med tensid

**Produksjonsland:** Sverige

- EN 13727 (Bakteriedrepende effekt) – 30 sek
- EN 13697 (Bakteriedrepende effekt) – 5 min
- EN 13624 (Gjærdrepende effekt) – 30 sek (Soppdrepende effekt) 15 min
- EN 13697 (Gjærdrepende effekt) 60 sek
- EN 14476 (Innkapslede virus, Adenovirus, Murint, Norovirus) – 30 sek
- EN 1348 (Mykobakteriecid effekt) 60 sek

**NB! Bruk biocider trygt! Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.**