

KIILTO PRO 75



Art. Nr: 493-12

Antall: 12 x 1 000 ml

EAN/ GTIN: 7331964004937

GTIN (krt): 7331964904930



KIILTO PRO 75

Overflatedesinfeksjon

Kiilto Pro Surface desinfeksjon 75 er en bruksklar løsning beregnet for desinfisering av synlig rene, glatte overflater. Den er effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som Corona, HIV, Hepatitt B og C samt enkelt nakne virus som Adenovirus og Murine Norovirus. Den fungerer raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

75 vol. % Alkoholstyrke, med etanol som hovedkomponent. Fungerer raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten. Har dokumentert effekt på bakterier, sopp og flere ulike virus som f.eks. Corona, HIV, Murine Norovirus og Adenovirus

Bruksanvisning

1. **Rengjør overflaten** med vanlig vaskemiddel hvis den er synlig skitten
2. **Spray rikelig** på den rengjorte overflaten eller bløtlegg en tørkeklut med uforynnet væske
3. **Bearbeid overflaten** gjentatte ganger i minst 30 sekunder (Se over for kontakttider)
4. **La overflaten lufttørke**

PRODUKTEGENSKAPER

- 75 vol. % alkoholstyrke, med etanol som hovedkomponent
- Virker raskt og effektivt uten å sette spor på den behandlede overflaten
- Har dokumentert effekt på bakterier, sopp og flere ulike virus som f.eks. Corona, HIV, Murine Norovirus og Adenovirus

Innhold: Ehtanol, 63,7 g/kg propanol 2

- EN 13727 (Bakteriedrepende effekt) – 30 sek
- EN 13697 (Bakteriedrepende effekt) – 5 min
- EN 13624 (Gjærdrepende effekt) – 30 sek (Soppdrepende effekt) 15 min
- EN 13697 (Gjærdrepende effekt) 60 sek
- EN 14476 (Innkapslede virus, Adenovirus, Murint, Norovirus) – 30 sek
- EN 1348 (Mykobakteriecid effekt) 60 sek

Bruksområde

Egnet for overflatedesinfeksjon i helsevesenet, odontologien eller i næringsmiddelsektoren.

NB! Bruk biocider trygt! Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.