

EXTRA



**Art. Nr:** 470-12

**Antall:** 12 x 1 000 ml

**EAN/ GTIN:** 7331964004708

**GTIN (krt):** 7331964904701



## EXTRA

### Overflatedesinfeksjon

**DAX Overflatedesinfeksjon Extra** består av ca. 45 vol% isopropylalkohol, overflateaktivt middel (smussoppløser) og korrosjonshemmer (forebygger rust). Produktet er beregnet for desinfeksjon av glatte overflater som f.eks. undersøkelsesbord, benker, bord og metallgjenstander. Produktet er effektivt mot bakterier, sopp og innkapslede virus som f.eks. Corona, Hepatitt B og C og HIV. Virker raskt og fordampes uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

#### Bruksanvisning

Tilsetning av overflateaktivt middel som smussfjerner gjør at overflaten ikke trenger å forbehandles

- 1. Bløtlegg** en tørkeklut med uforynnnet løsning eller spray direkte på overflaten
- 2. Behandle overflaten** gjentatte ganger
- 3. La overflaten være lett fuktig** på slutten av eksponeringstiden og la den lufttørke

Metallgjenstander (ikke CE-merket)

- 1. Tørk vekk** organisk materiale som f.eks. blod fra gjenstanden
- 2. Plasser gjenstanden** i uforynnnet løsning og la den stå i minst 1 minutt
- 3. Bruk nok overflatedesinfeksjon** til at overflaten er fuktig i hele kontakttiden.

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Dokumentert effekt på bakterier, sopp og innkapslede virus som Corona
- Inneholder korrosjonsbeskyttelse
- Består av ipa og har 45 volumprosent alkoholstyrke
- Virker raskt og fordampes uten å etterlate spor på den behandlede overflaten eller på metallgjenstanden
- Tilsetning av overflateaktivt middel som f.eks. en flekkfjerner gjør at overflaten ikke trenger å forbehandles
- EN 13727 (Bakteriedrepende effekt) – 60 sek
- EN 13697 (Bakteriedrepende effekt) – 60 sek
- EN 13624 (Gjærdrepende effekt) – 5 min
- EN 14476 (Vaccinia virus / kapslede virus) – 30 sek (Adenovirus) – 5 min

**Bruksområder:** For desinfeksjon i helsevesen, odontologi og dyrehelse.

**NB! Bruk biocider trygt! Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.**