



PLUS M/TENSID

Overflatedesinfeksjon

DAX Pro Overflatedesinfeksjon plus består av ca. 45% vol isopropylalkohol og overflateaktivt middel (smussfjerner) og er beregnet for desinfeksjon av glatte overflater, f.eks. undersøkelsessofaer, benker og bord.

Produktet er effektivt mot bakterier, sopp og innkapslede virus som f.eks. Corona, Hepatitt B og C, og HIV.

Virker raskt og fordamper uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

Bruksanvisning

Brukes på overflater som tåler alkohol. Tilsetning av overflateaktivt middel gjør at overflaten ikke trenger å rengjøres først. Inneholder ikke lakserolje.

- 1. Spray rikelig på overflaten** eller bløtlegg en tørkeklut med uforynnet væske
- 2. Bearbeid overflate** gjentatte ganger i minst 30 sekunder (se etikett for kontakttider)
- 3. La overflaten lufttørke**

Oppbevaring

Oppbevares i romtemperatur, lukk lokket etter bruk. Holdbar i 3 år fra produksjon.

PRODUKTEGENSKAPER

- Består av IPA og har 45 volumprosent alkoholstyrke
- Virker raskt og fordamper uten å etterlate spor på den behandlede overflaten
- Tilsetning av overflateaktivt middel som fjerner smuss og gjør at overflaten ikke trenger å forbehandles
- God oppløsende effekt på f.eks. søl av blod

Innhold: Isopropanol (45% vol) Med tensid

pH: 8,5 svakt alkalisk

Desinfeksjonsmiddel BPR reg. Nr. 5654-1-3. Virkestoffer og biocidprodukt er godkjent i henhold til biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

- EN13727 (Bakteriedrepende effekt) 30 sek
- EN 13697 (Bakteriedrepende/ soppdrepende effekt) 60 sek
- EN 13624 (Gjærdrepende effekt) 30 sek
- EN 14476 (Vacciniavirus/ innkapslede virus) 30 sek (Adenovirus 5 min)
- EN 14348 (Mykobakterieicid effekt) 60 sek

NB! Bruk biocider trygt! Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.

PLUS M/TENSID



Art. Nr: 468-12
Antall: 12 x 1 000 ml
EAN/ GTIN: 7331964004685



Art. Nr: 469-3
Antall: 3 x 5 000 ml
EAN/ GTIN: 7331964004692