

PREOP



Art. Nr: C464

Antall: 15 x 600 ml

EAN/ GTIN: 7331964004647

GTIN (krt): 7331964904640



PREOP

Hånddesinfeksjon

DAX Preop er et kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel

beregnet for desinfeksjon av hender før operasjon.

Produktet er etanolbasert (ca. 80% vol) med tilsetning av n-propanol for utvidet effekt.

Inneholder og glyserin som fukter huden.

Brukerveiledning

- 1. Vask hender og underarmer** med mild såpe og vann i minst 1 minutt
- 2. Tørk hender, underarmer og albuer** grundig med tørkepapir (Huden må være tørr før hånddesinfeksjonen starter)
- 3. Ta en generøs mengde DAX Perop**, minst 4,5 ml, og masser inn i hender, håndledd, underarmer og til slutt albuer i 45 sekunder
- 4. Ta ytterligere minst 4,5 ml.** DAX Preop, og masser inn i hender, håndledd og underarmer i 45 sekunder
- 5. For å oppnå optimalt resultat** må huden holdes fuktig gjennom hele desinfeksjonsfasen
- 6. Lufttørk** hender og underarmer.

OBS ! Ikke ta på deg operasjonshanskene før huden er helt tørr.

PRODUKTEGENSKAPER

- Virker raskt og fester seg ikke etter fordamping
- Oppfyller blant annet EN12791, EN 1500 og har dokumentert effekt på bakterier som Pseudomonas, Aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Enteroococcus hirae
- Dokumentert effekt på innkapslede virus som Hepatitt B, Hepatitt C og HIV
- Dokumentert effekt på mykomakterier som Mycobacterium terrae og visse nakne virus som Rota Virus og Murine Norovirus

Sammensetning: Etanol 80% vol.

Med tilsetning av n-propanol for utvidet effekt.

- EN12791 – 9 ml i 1,5 min
- EN1500 (bakteriedrepende effekt) 3 ml – 30 sek
- EN13727 (Bakteriedrepende effekt) 30 sek
- En13624 (Gjærdrepende effekt) 30 sek
- EN1348 (Tuberkulosesideffekt) 30 sek
- EN14476 (Innkapslede virus) 15 sek, (Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

NB! Bruk biocider trygt! Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.